

Références de commande

Réactifs

REF		CONT
RBTUR-B00	Trousse universelle	1x 40 ml R1 + 1 x 13 ml R2
RBTUR-H00	Trousse universelle	2 x 40 ml R1 + 2 x 13 ml R2
RBTUR-L00	Trousse universelle	12 x 40 ml R1 + 12 x 13 ml R2

Autres produits nécessaires

REF		CONT
RBREK-000	Trousse de Calibrants RBP (5 Niveaux)	5 x 1 ml
RBCOS-002	Contrôle RBP Bas	1 x 2 ml
RBCON-002	Contrôle RBP Moyen	1 x 2 ml
RBCOX-002	Contrôle RBP Haut	1 x 2 ml

Domaine d'utilisation – Destination

Réactif de diagnostic in vitro pour la détermination quantitative de la retinol-binding protein dans des échantillons d'origine humaine par immuno-turbidimétrie sur systèmes photométriques.

Intérêt médical – Validité scientifique

La retinol-binding protein (RBP) est une protéine non glycosylée synthétisée par le foie. La RBP a pour rôle le transport sanguin du rétinol (vitamine A) du foie vers les tissus cibles (rétine, peau...). Cette protéine est ensuite métabolisée, filtrée et réabsorbée au niveau du rein. La RBP est un marqueur sensible de la dénutrition et le suivi de sa concentration sérique permet la surveillance de l'état nutritionnel. Une diminution de la concentration sérique et plasmatique de la RBP est également observée en cas d'hypovitaminose A, de néphropathies tubulaires, d'insuffisances hépatocellulaires ou d'inflammations sévères ou aiguës. Une augmentation de la RBP est corrélée avec une insuffisance rénale d'origine glomérulaire, le diabète de type 2 ou de stéatose.

Principe de la méthode

La retinol-binding protein contenue dans l'échantillon à doser réagit spécifiquement avec un antisérum anti-retinol-binding protein humaine et la turbidité induite par la formation du complexe immun antigène-anticorps est mesurée à 340 nm et 700 nm. La turbidité mesurée est proportionnelle à la concentration en retinol-binding protein contenue dans l'échantillon.

Mise en garde et précautions d'emploi

- Pour usage diagnostic in vitro uniquement.
- Doit être manipulé par du personnel habilité sous la responsabilité d'un biologiste.
- Les produits d'origine humaine ont subi un dépistage négatif concernant les anticorps anti-VIH 1 et 2, les anticorps anti-VHC et l'Ag HBs mais doivent cependant être manipulés comme des produits potentiellement infectieux.
- Ces produits contiennent de l'azide de sodium. Les produits contenant de l'azide de sodium doivent être manipulés avec précaution: éviter l'ingestion et le contact avec la peau ou les muqueuses.
- L'azide de sodium devient explosif au contact de métaux lourds comme le cuivre ou le plomb.

Echantillons

Conditions de collecte

Prélever les échantillons selon les techniques de laboratoires classiques et, à cette fin, utiliser uniquement des procédures, des tubes ou récipients de recueil appropriés.

Type d'échantillon

Sérum et plasma frais

Conservation et stabilité des échantillons

Température	Stabilité
- 70 °C	Indéfiniment
- 20 °C	≤ 6 mois
4 - 8 °C	≤ 72 heures

Ces informations proviennent des données issues du « Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests » et du « WHO ».

Réactifs

Composition et concentrations / Conservation

Composants actifs :

Réactif R1 : aucun.

Réactif R2 : antisérum de chèvre anti-RBP.

Autres composants :

Réactif R1 : tampon, polymère, sel inorganique et conservateur.

Réactif R2 : tampon, sel inorganique et conservateur.

Température de conservation :

Réactif R1 : 2 - 8 °C.

Réactif R2 : 2 - 8 °C.

Préparation

Prêts à l'emploi.

Conservation et stabilité

Les réactifs sont stables jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'emballage (mois révolu), dans les conditions de conservation et de manipulation recommandées suivantes :

- Flacon non ouvert conservé à la température indiquée sur l'emballage.
- Flacon ouvert : refermé après usage ou positionné sur analyseur fermé prévu à cet effet, non contaminé par la manipulation et conservé à la température indiquée sur l'emballage.

Note :

- Ne pas congeler les réactifs.
- Les réactifs à base de nanoparticules peuvent sédimenter au cours du temps. Il peut être nécessaire de les homogénéiser délicatement par retournement successifs.

Autres matériels nécessaires

Equipement habituel de laboratoire dont un système analytique équipé d'un détecteur photométrique.

Calibration

Etalonnage

La courbe de calibration est effectuée en utilisant le kit de calibration indiqué dans la section « Référence de commande ». Le point zéro de la courbe de calibration est effectuée avec du sérum physiologique.

Traçabilité

La méthode a été standardisée par rapport à une méthode de référence traçable au standard international tel que décrite dans la fiche technique des calibrants associés (voir paragraphe « références de commande »).

Calibrer la méthode quand le numéro de lot du réactif change ou en cas de modification des performances (contacter le fabricant si les modifications subsistent) ou si le contrôle de qualité l'exige.

Contrôle de qualité

La fréquence des contrôles et les limites de confiance doivent être adaptées aux exigences du laboratoire. Les résultats doivent se situer dans les limites de confiance définies. Chaque laboratoire devra établir la procédure à suivre si les résultats se situent en dehors des limites définies. Se conformer à la législation dans le pays et aux directives locales en vigueur relatives au contrôle de qualité.

La courbe de calibration et sa stabilité peuvent être validées en utilisant les matériaux de contrôles indiqués dans la section références de commande.

Valeurs de référence

Individu sain	Valeurs de référence
	30 - 60 mg/L

Unités internationales: mg/L

Unités conventionnelles: mg/L

Ces informations proviennent des données issues du « Clinical guide to laboratory tests ». Chaque laboratoire devra vérifier la validité de ces valeurs et établir au besoin ses propres valeurs de références selon la population examinée.

Performances analytiques

Les performances analytiques ci-dessous sont données à titre indicatif. Les résultats obtenus au laboratoire peuvent différer de ceux-ci.

Plage de mesure

7,81-141 mg/L

La Limite de Quantification a été déterminée conformément aux recommandations du protocole EP17-A2 du CLSI, sur la base de 126 déterminations et avec une ET de 20 % calculée sur le modèle Westgard. Les biais associés et les constituants de précision étaient respectivement de 0,4 mg/L et 7,5 %.

La linéarité a été évaluée selon le protocole EP06-A du Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI). La méthode a été démontrée pour être linéaire jusqu'à 141 mg/L.

Le domaine de mesure est lié aux limites de quantification et de linéarité. Les échantillons ayant une concentration supérieure à la limite supérieure doivent être dilués.

Limites inférieures de mesure

Limite du Blanc = 0,65 mg/L

Limite de Détection = 1,25 mg/L

La Limite du Blanc a été déterminée conformément aux recommandations du protocole EP17-A2 du CLSI, sur la base de 120 déterminations d'échantillons blancs. La Limite du Blanc correspond au 95ème percentile de la distribution standard normale de la détermination d'échantillons blancs.

La Limite de Détection a été déterminée conformément aux exigences EP17-A2 du CLSI et à un rapport de résultats faussement positifs (α) de moins de 5 % et faussement négatifs (β) de moins de 5 %, basés sur 120 déterminations avec des répliques à taux faible.

Interférences (Spécificité analytique)

Ictère: Pas d'interférence significative par la bilirubine jusqu'à 500 $\mu\text{mol/L}$ ($< 10\%$ ou 2 SD).

Hémolyse: Pas d'interférence significative par l'hémoglobine jusqu'à 6,9 g/L ($< 10\%$ ou 2 SD).

Lipémie: Pas d'interférence significative par le taux de triglycérides jusqu'à 32 g/L ($< 10\%$ ou 2 SD).

Précision

La précision a été évaluée à l'aide de 3 contrôles de qualité selon le protocole EP05-A3 du CLSI. La précision inter-série a été déterminée à l'aide de 2 séries par jour en 2 répliques par série. La précision intra-lab a été déterminée à l'aide d'un lot de réactif et d'au moins 4 calibrations. Ces résultats reposent sur des directives. Les variables (par ex. procédure de maintenance de l'instrument, milieu, manipulation des échantillons) peuvent avoir une influence sur la reproductibilité des résultats du test.

	Nombre de jours	Nombre de mesures	Concentration moyenne	CV intra-série	CV intra-lab
Contrôle 1	22	88	33.80 mg/L	2.53 %	3.53 %
Contrôle 2	22	88	50.49 mg/L	1.80 %	2.81 %
Contrôle 3	22	88	62.93 mg/L	1.30 %	2.56 %

Justesse – Exactitude

La justesse, quantifiée par le biais, est estimée en comparant la moyenne obtenue lors de l'étude de la fidélité intermédiaire, établie sur des échantillons de CIQ, à la valeur cible attendue, assimilée à la valeur « vraie » de l'échantillon testé.

L'exactitude est définie comme étant l'étroitesse de l'accord entre une valeur mesurée et une valeur vraie d'un mesurande (grandeur que l'on veut mesurer).

Diagam autorise un biais de 5% par rapport au standard international ou par rapport à une méthode de référence traçable au standard international quand il existe.

Limites de la méthode

Les résultats de ce test doivent toujours être interprétés en rapport avec les antécédents médicaux du patient, les signes cliniques et autres constatations.

Prozone

En limitant la linéarité à la valeur de la limite haute de la plage de mesure, aucun effet d'excès d'antigène n'a été observé pour des échantillons avec une concentration allant jusqu'à 600 mg/L.

Effet de matrice

Les échantillons de contrôles interlaboratoires et de contrôles peuvent donner des résultats différents de ceux obtenus avec d'autres méthodes de dosage pour des raisons d'effet de matrice. Dans ce cas de figure, une analyse des résultats en fonction des valeurs cibles spécifiques de la méthode employée pourrait être nécessaire. En cas de doute, contacter le fabricant.

Procédure d'utilisation

Si l'application correspondante au code-barres n'est pas installée sur votre analyseur, veuillez contacter DiAgam. En effet, des applications validées CE sont disponibles auprès du fabricant.


















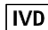


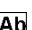
Pour une description détaillée de la procédure d'analyse, veuillez-vous reporter au mode d'emploi de votre système.


Bibliographie

1. Tietz Textbook of Clinical chemistry and molecular Diagnostics, fourth edition, edited by Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood, David E. Bruns, 2006
2. Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations & Stability of blood, plasma and serum samples. Publication WHO/DIL/LAB/99.1 Rev. 2. Jan. 2002.
3. Clinical guide to laboratory tests, second edition, edited by Norbert W. Tietz, 1990
4. CLSI. Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition. CLSI document H3-A6 (ISBN 1-56238-650-6). CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA; 2007.
5. NCCLS. Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens; Approved Standard-Fifth Edition. NCCLS document H4-A5 [ISBN 1-56238-538-0]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA, 2004.

Légende des symboles

Les symboles suivant sont susceptibles de figurer sur le conditionnement et l'étiquette :

	Code du lot		Tampon
	Utiliser jusque		Calibrant
	Fabricant		Elevé
	Dispositif médical de diagnostic in vitro		Moyen
	Température (Conservation à)		Bas
	Référence du catalogue		4 niveaux
	Consulter les instructions d'utilisation		5 niveaux
	Réactif		6 niveaux
	Trousse		Contrôle
	Contenu		Ce produit répond aux exigences de la Directive Européenne 98/79 CE concernant les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
	Anticorps ou Antisérum		

 DiAgam Headquarters Distributed by	DiAgam Belgium : Rue du Parc Industriel 40, 7822 Ghislenghien, Belgium Avenue Louis Lepoutre 70, 1050 Bruxelles, Belgique DiAgam France : Boulevard de la Liberté 130, 59000 Lille, France
--	--

All product names, registered trademarks, company names in this document remain the property of their respective owners.